

Instrukcja użytkowania



CLINISTORE – butelki jednorazowe, sterylne, RtU

o poj. 50 ml, 80 ml, 120 ml, 250 ml




CLINISTORE:

Jednorazowe butelki na pokarm dostępne są w rozmiarach 50 ml, 80 ml, 120 ml, 250 ml, w dwóch różnych wersjach:

- **Sterylna**, pakowane pojedynczo,  jeśli opakowanie jest uszkodzone, prosimy nie używać butelki 
- **Ready to Use**, biologicznie czyste w opakowaniach zbiorczych

Wskazania:

Jednorazowe butelki służą do kolekcjonowania i przechowywania oraz podawania odciągniętego pokarmu. Na terenie szpitala powinny być użytkowane wyłącznie jako jednorazowe, dlatego są oznakowane 

Przy odciąganiu pokarmu:

Nie dotykaj wewnętrznych części butelki ani pokrywki przed użyciem.

Przed kolekcjonowaniem pokarmu butelkę zakręć do oryginalnych zestawów współpracujących z laktatorami Ardo (zgodnie z odrębną instrukcją laktatora)

Przechowywanie:

Po odciążeniu pokarmu, zakręć pokrywkę na butelce. Jeżeli jest taka potrzeba na butelce można umieścić nalepkę z oznakowaniem odciągniętego pokarmu, datą odciążania itp.

Odciągnięty pokarm może być przechowywany w następujących warunkach:

- W temperaturze pokojowej 16-29 °C optymalnie 3-4 godziny
6-8 godzin wyłącznie w warunkach bardzo czystych
- W lodówce w temperaturze mniejszej niż 4 °C optymalnie przez 72 godziny (3 dni)
5-8 dni wyłącznie w warunkach bardzo czystych
- W zamrażarce w temperaturze mniejszej niż -17 °C optymalnie przez 6 miesięcy, opcjonalnie do jednego roku.

Utylizacja: zgodnie z lokalnymi regulacjami

Butelkę wykonano z PP polipropylenu

Pokrywkę wykonano z PE polietylenu