

Instrukcja użytkowania



Tulips – nakładki silikonowe

Opakowanie zawiera: jedną sterylną nakładkę Tulips

Wskazania: Silikonowe nakładki Tulips służą do okresowej ochrony wrażliwych lub poranionych brodawek w trakcie karmienia piersią. Występują w trzech rozmiarach L, M, S. W przypadku przedłużającego się problemu z brodawkami skontaktuj się ze swoją konsultantką laktacyjną.

Użytkowanie:

- Zawsze myj ręce przed zakładaniem nakładek.
- Nawilż wewnętrzną stronę nakładki niewielką ilością własnego pokarmu, wody lub lanoliny, żeby lepiej przylegała do brodawki. Przyciągnij krawędzie nakładki na zewnątrz i ustaw nad brodawką w pozycji pozwalającej na późniejszy kontakt noska dziecka z Twoją piersią. (przykład rys.1)
- Nałóż nakładkę w całości na pierś, pozycjonowanie wycięcia w zależności pozycji przystawiania dziecka do piersi (przykład rys 2.)

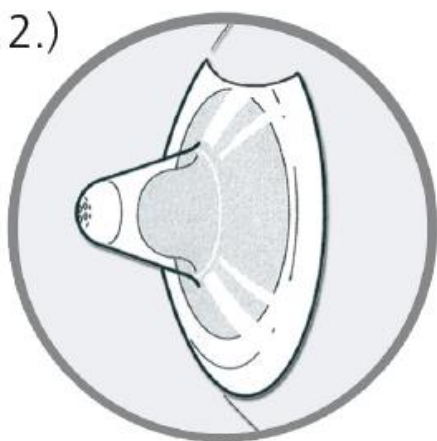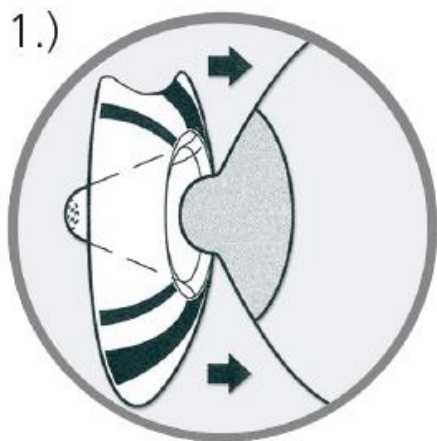

Zalecenia: Tulipsy zakładaj wyłącznie w trakcie karmienia piersią. Potem zdejmij je i umyj zgodnie z instrukcją. Częste wygotowywanie i sterylizacja skracają żywotność produktów. Zaleca się odkładanie do pudełka nakładek całkowicie wysuszonych. Przestań używać nakładek, jeśli zauważysz na nich jakiegokolwiek uszkodzenie. Przechowuj Tulipsy i akcesoria poza zasięgiem małych dzieci.

Instrukcja mycia i sterylizacji:

W domu:

Wygotuj nakładki silikonowe przez 10 minut przed pierwszym użyciem. W trakcie użytkowania poddawaj je dezynfekcji termicznej w razie potrzeby. Myj w ciepłej wodzie z użyciem płynu po każdorazowym użytkowaniu, następnie dokładnie wypucz i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nakładki Tulips wraz z pudełkiem ochronnym można myć w zmywarce.

W szpitalu nakładki Tulips można:

sterylizować w temperaturze 121 °C przez 20 minut lub w 134 °C przez 18 minut.

zarówno nakładki jak i pudełko ochronne można

dezynfekować termicznie w temperaturze 93 °C przez około 10 min lub w torebkach Easy Clean zgodnie z ich instrukcją.

Utylizacja: zgodnie z lokalnymi regulacjami